



OCULUS Maddox-kors

Bruksanvisning

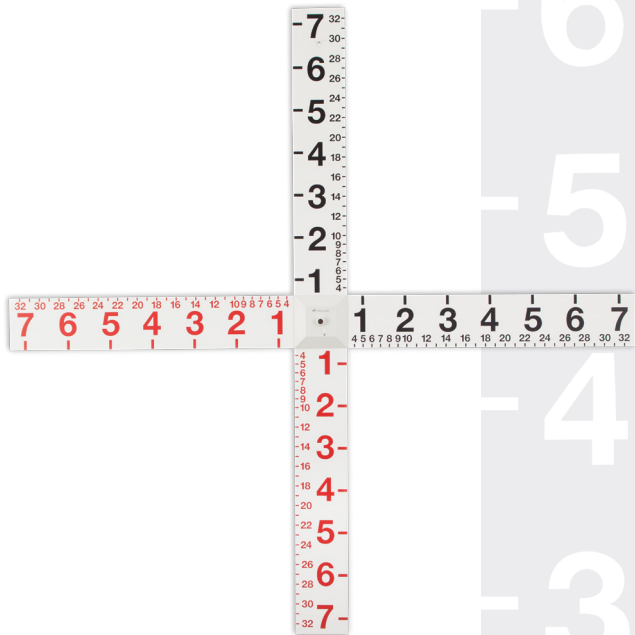

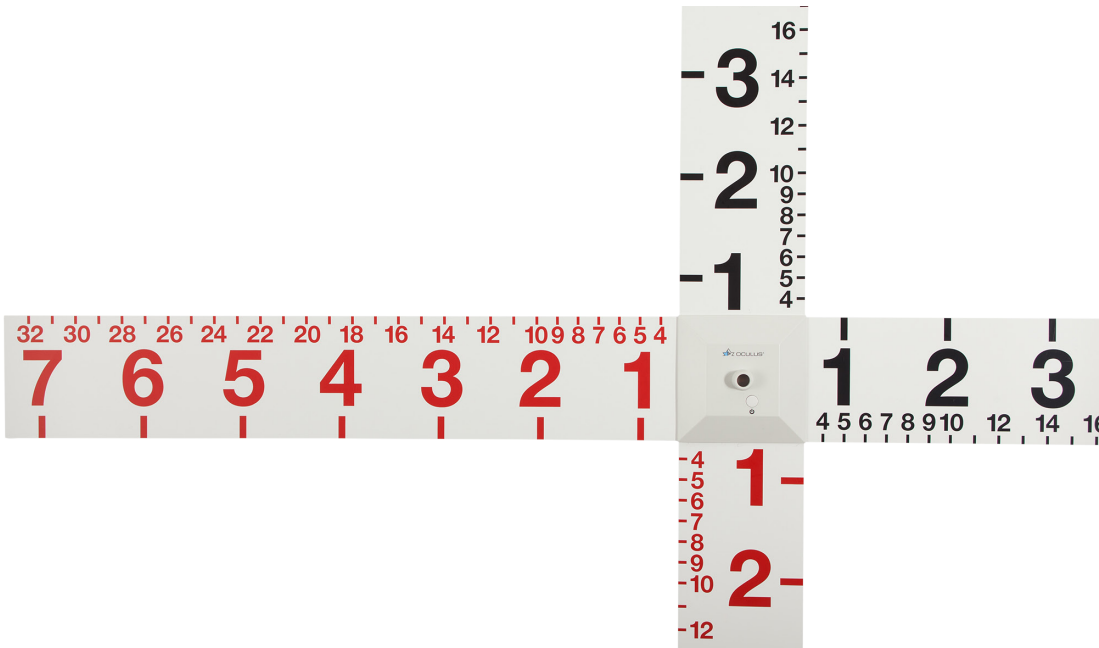





no

Dette produktet er CE-merket i samsvar med bestemmelsene i direktivet 93/42/EØS for medisinsk utstyr.

Innholdsfortegnelse

Tekniske data	6
Oversikt.....	10
Tiltenkt bruk.....	11
Leveringsomfang	11
Sikkerhetsanvisninger	12
Montering	12
Betjening	14
Rengjøring og stell	14
Avfallshåndtering	15
Garanti.....	15
Produsent og service	16

Tekniske data

Mål (B × D × H)	1290 × 28 × 1290 mm
Vekt/ Maddox-kors Nettadapter	920 g 65 g
Strømforsyning	5 V DC, 100 mA, USB-plugg type A
Kabellengde / Cable length /	2 m
Medfølgende plagget nettdel	USB, 100–240 V AC, 50–60 Hz 0,3 A, Sek. 5 VDC, 1,2 A, REF 05150950, med EU-adapter
Belysning	LED

Klassifisering iht. IEC 60601-1:	
Grad av beskyttelse mot elektrisk støt: Type B Type beskyttelse mot elektrisk støt: Beskyttelsesklasse I	
Driftsbetingelser:	
Temperatur	+10 °C – +40 °C
Luftfuktighet	30–75 %
Luftrykk	700–1060 hPa
Transportbetingelser:	
Temperatur	-40 °C – +70 °C
Luftfuktighet	10–95 %
Luftrykk	500–1060 hPa

Lagringsbetingelser:

Temperatur -10 °C – +55 °C

Luftfuktighet 10–95 %

Lufttrykk 700–1060 hPa

Skala Vinkelgrad
(1 grad = ca. 1,75 pdpt)

Symboler



Firmalogo



Produsent



CE-merke/



IP00

Beskyttelsesgrad og klasse



Apparatnummer




Partinummer



Les bruksanvisningen



Datamatrisekode

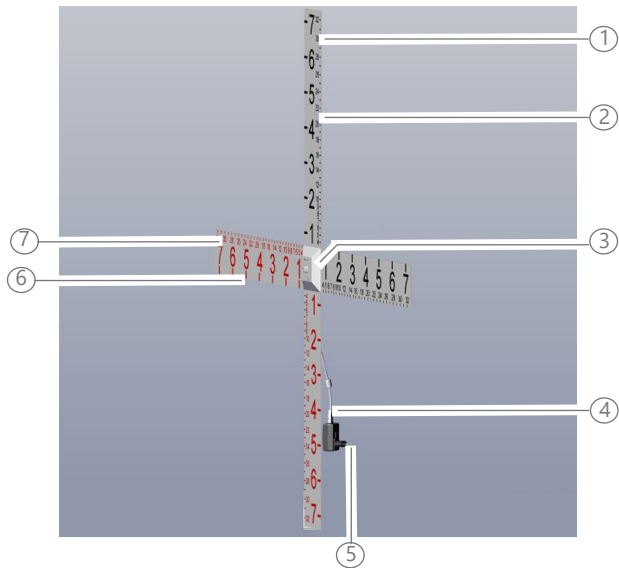

- 1 Borehull til oppheng
- 2 Skalaarm
- 3 Belysning med på-/av-bryter
- 4 USB-kontakt
- 5 Nettdel med USB-plugg
- 6 Vinkelgrad-opplysninger, 5 m testavstand
- 7 Vinkelgrad-opplysninger, 1 m testavstand

Tiltenkt bruk

Maddox-korset er en tangentskala til å bestemme sjelevinkelen og å teste korrespondansen.

Leveringsomfang

- Skalasett
- Belysning
- 4 skruer
- Nettdel med USB-plugg

Med forbehold om endringer av leveringsomfanget i rammen av teknisk videreutvikling.



Sikkerhetsanvisninger

- Koble til USB-kontakten først etter monteringen.
- Koble USB-kontakten til strømforsyningen med den medfølgende nettdelen. Stikk USB-pluggen aldri inn i en nettstikkontakt.
- Koble USB-kontakten fra strømforsyningen før rengjøring.
- OCULUS Optikgeräte GmbH er ikke ansvarlig for videre bruk av dataene tatt opp med Maddox-korset i noen som helst form.


Montering

Til montering trenger du

- middels stor, flatt skrutrekker
- mykt underlag
- kroker eller skruer til feste på veggen

Monteringshøyde: Fikseringslyset bør befinne seg i øyehøyden til testpersonen. Anbefalt høyde for spiker eller skrue: ca. 1,75 m.

- Koble til USB-kontakten først etter monteringen.
- Monter Maddox-korset på en bakgrunn uten forstyrrelser, f.eks. på en hvit vegg.

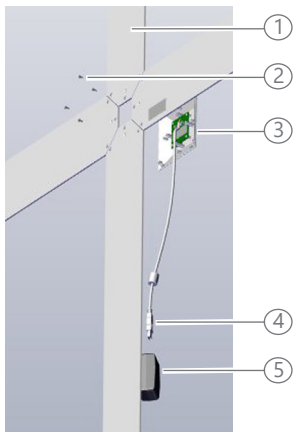

- 1 Skalaarm med borehull for feste, side uten tekst
 - 2 4 skruer
 - 3 Belysning med på-/av-bryter
 - 4 USB-kontakt
 - 5 Nettdel med USB-plugg
- Legg komponentene på det myke underlaget.

- Snu belysningen (3) opp-ned.
- Legg belysningen foran deg slik at teksten blir korrekt leselig når den er hengt opp.
- Monter først skalaarmen med borehullene for oppheng (1), slik at den peker oppover.
- Stikk de tre borehullene på skalaarmen på de tre festehylsene til belysningen. Teksten på skalaarmen peker nedover på underlaget.
- Fest skalaarmen med en skrue (2).
- Festen de resterende tre skalaarmene på samme måte. Pass på at skriften går rett vei.
- Heng Maddox-korset på en krok eller en skrue.
Fikseringslyset bør befinne seg i øyehøyden til en testperson som sitter foran.
- Koble USB-kontakten til strømforsyningen med den medfølgende USB-nettdelen. Stikk USB-pluggen aldri inn i en nettstikk-kontakt.

Betjening

Du kan utføre f.eks. følgende undersøkelser med Maddox-korset:

- Bestemme sjelevinkelen ved hjelp av subjektiv lokalisering
- Bestemme sjelevinkel med lysreflekser
- Undersøke cyklodeviasjon etter konfusjonsprinsippet
- Teste korrespondanse
- Slå på belysningen med på-/av-bryteren.
- Gjennomfør ønsket undersøkelse.
- Slå av belysningen etter undersøkelsen.

Rengjøring og stell



Slå av belysningen med på-/av-bryteren og koble USB-kontakten fra strømforsyningen.

- Rengjør Maddox-korset ved behov med en myk, lofri klut.
- Når det er veldig skittent anbefaler vi: Bruk vanlig oppvaskmiddel på en myk klut.
- Bruk aldri alkohol, etter eller lignende rengjøringsmidler til rengjøring.

Avfallshåndtering



I henhold til Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2012/19/EU fra 27. januar 2003 om elektrisk og elektronisk avfall og tilsvarende lover i Tyskland skal elektrisk og elektronisk avfall samles inn, gjenvinnes og ikke kastes i restavfall.





- Kasser Maddox-korset på korrekt vis.

Garanti

Garantien vår er i samsvar med lovmessige bestemmelser, regnet fra leveringsdato. Denne garantien omfatter alle feil som følge av materiale eller produksjon. Dersom du innenfor garantiperioden får grunn til en berettiget klage, blir den utbedret kostnadsfritt. Garantien dekker ikke normal slitasje, uaktsom bruk eller bruk av reservedeler som ikke er originale fra OCULUS.

Produsent og service

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
GERMANY - 35582 Wetzlar

 +49-641-2005-0
 +49-641-2005-255
 sales@oculus.de
 www.oculus.de



OCULUS er sertifisert iht. DIN EN ISO 13485

10043526 – Rev.03



6

5

4

3