




9
Beide Schaumstoffteile
anbringen.
Attach both foam parts.

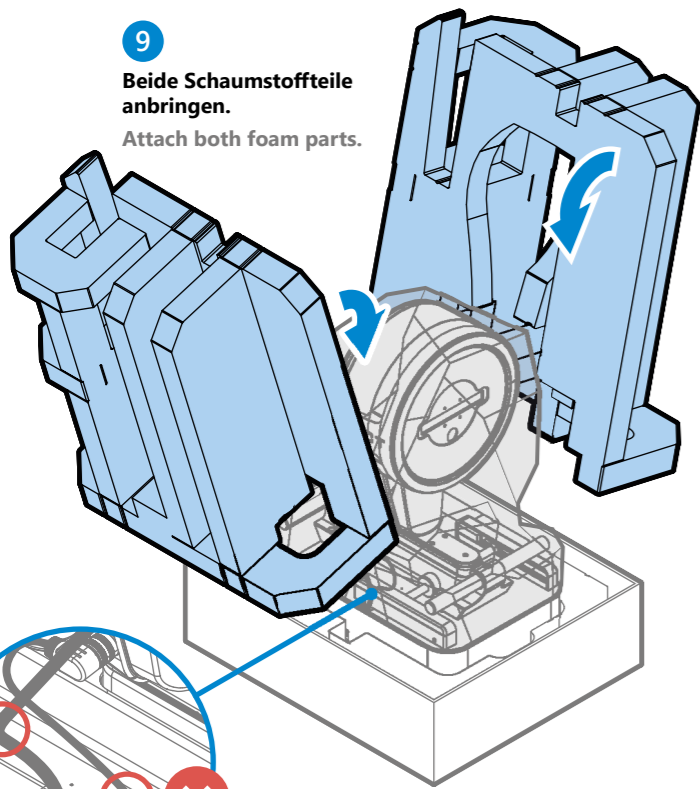

i Glasfaserkabel nicht abknicken oder quetschen.
Do not kink or crush fiber optic cables.

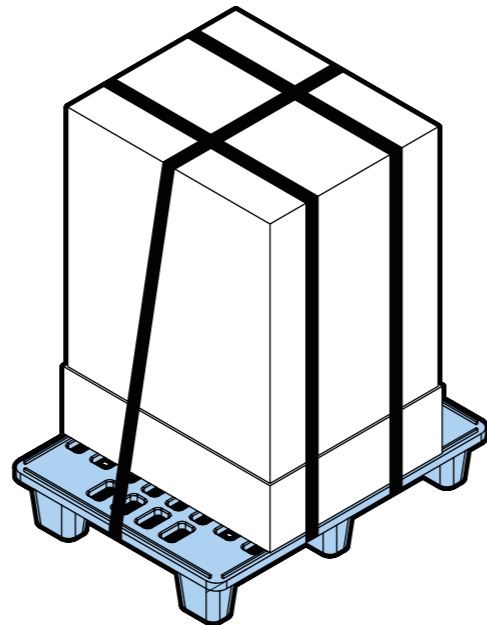

12
Verpackung für den
Versand auf einer Palette
verzurren.
Lash packaging on a
pallet for shipping.

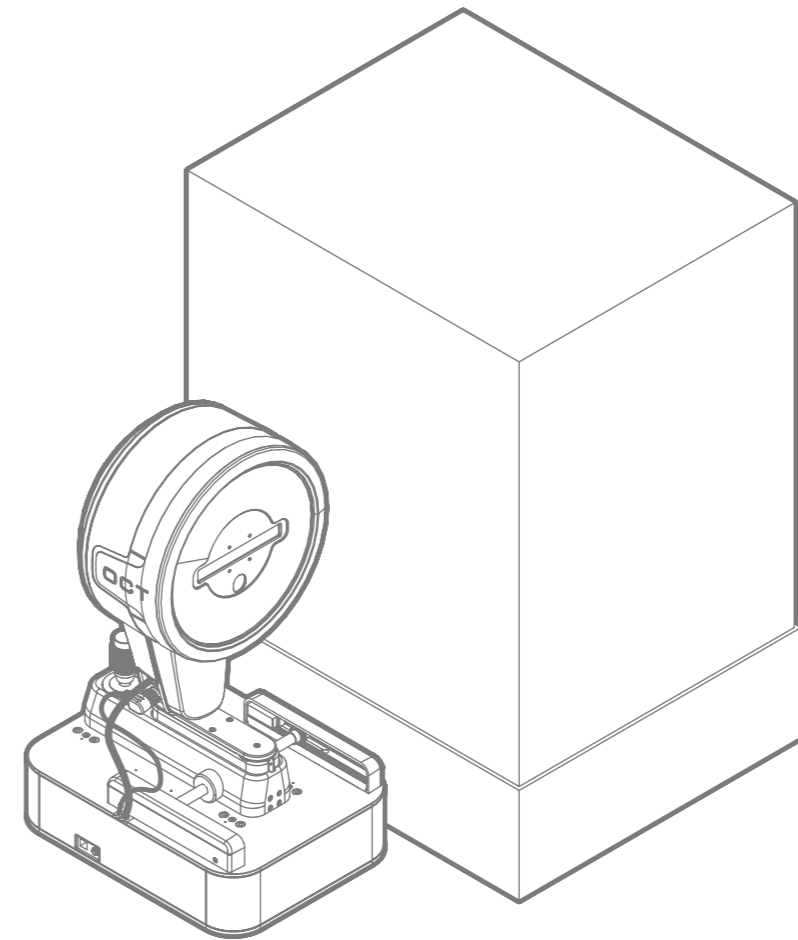

OCULUS Pentacam[®] Cornea OCT

Verpackungsanleitung Packing instructions

Zeichenerklärung Explanation of symbols

i Kennzeichnet wichtige Hinweise.
Indicates important notes.

Sicherheitshinweise Safety instructions

i Die Hinweise dieser Verpackungsanleitung gelten nur in Verbindung mit der Gebrauchsanweisung Ihrer OCULUS Pentacam Cornea OCT.
The information in these packing instructions only applies in conjunction with the operating instructions for your OCULUS Pentacam Cornea OCT.

Um Schäden am Gerät zu vermeiden:

To prevent damage to the device:

- Verpackungsanleitung unbedingt befolgen,
Always follow the packing instructions,
- Original-Transportverpackung für den Rückversand verwenden.
Use the original transport packaging for the return shipment.

Transport und Lagerbedingungen Transportation and storage conditions


	Temperatur Temperature	Rel. Feuchte Rel. humidity	Luftdruck Air pressure
Transport Transportation	-40°C – +50°C	10 % – 95 %	500 hPa – 1060 hPa
Lagerung Storage	-10°C – +50°C	10 % – 95 %	700 hPa – 1060 hPa

- Verpacktes Gerät vor Nässe schützen.
Protect the packed device from moisture.


Artikelnummer / Item number: 10039390

Revision: 00


Freigabe / Release: 18.03.2025

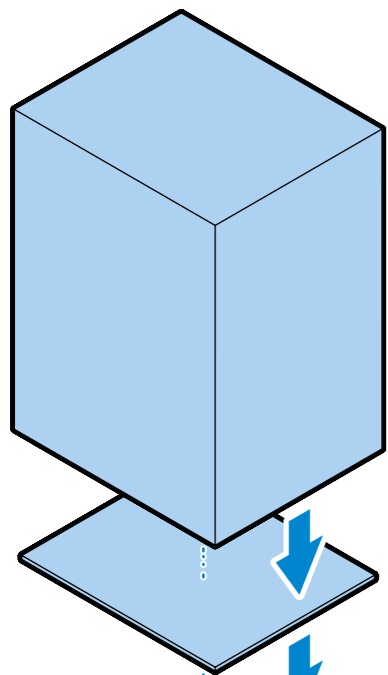

11
Oberteil der Verpackung
überstülpen.
Put upper part of the
packaging on.

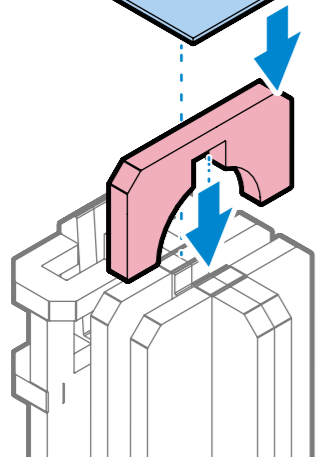


10
Rote Schaumstoffsi-
cherung anbringen.
Attach red foam fuse.

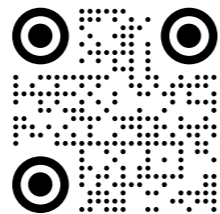

WWW.OCULUS.DE

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Str. 29 • 35582 Wetzlar • GERMANY
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-255
Email: sales@oculus.de • www.oculus.de


ENTPACKEN UNPACKING

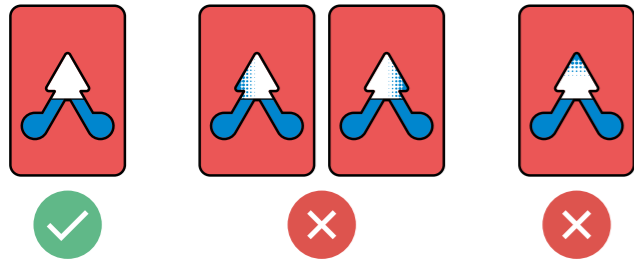


1 Kippsensor prüfen. Check tip sensor.

Falls der Kippsensor ausgelöst hat, OCULUS informieren und den Kippsensor dokumentieren.
If the tip sensor has been triggered, inform OCULUS and document the tip sensor.


2 Oberteil der Verpackung abnehmen. Remove upper part of the packaging.

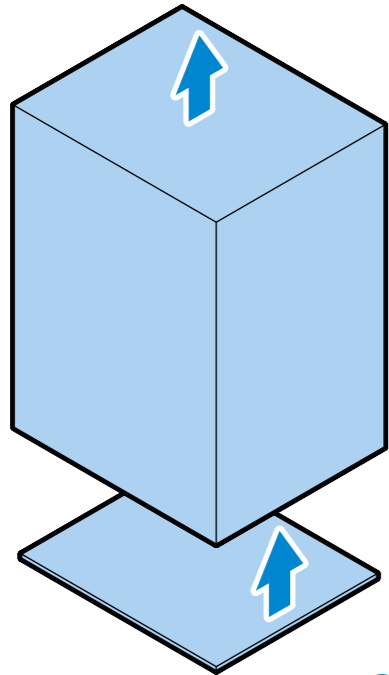


3 Rote Schaumstoffsicherung und Schaumstoffteile abnehmen. Remove red foam fuse and foam parts.

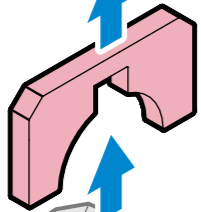


4 Staub-Schutzfolie entfernen. Remove dust protection foil.

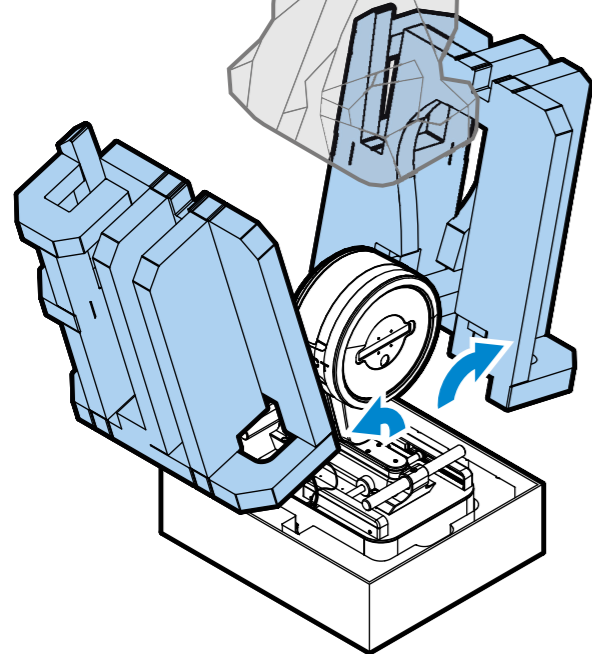


8 Messkopf mit etwas Druck leicht nach vorne kippen und Gleitplatte unterziehen. Tilt the measuring head slightly forwards with a little pressure and slide the slide plate underneath.

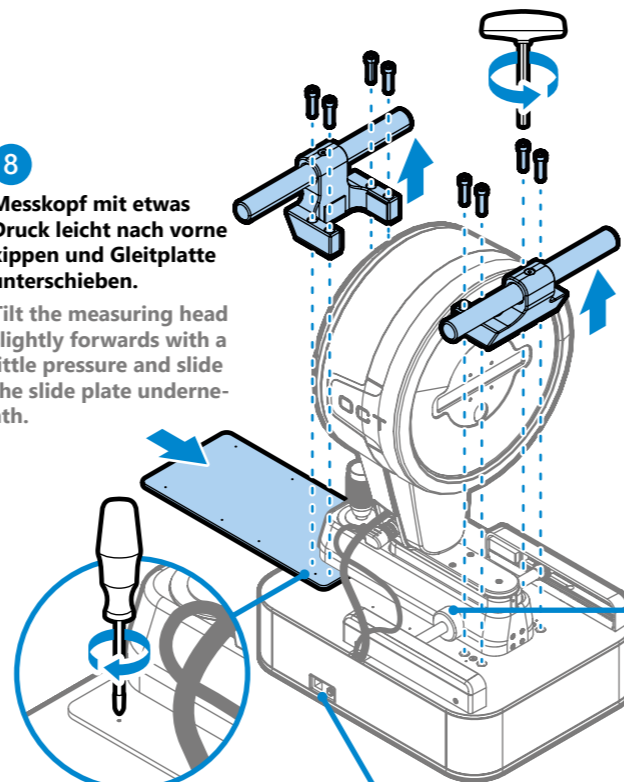

9 Gleitplatte mit 8 Schrauben anschrauben. Screw the slide plate with 8 screws.

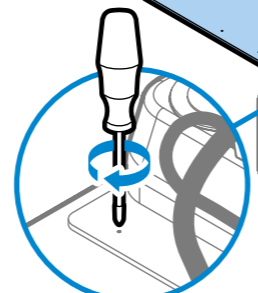


5 Gerät mit 2 Personen an den Tragegriffen aus der Verpackung an den Bestimmungsort heben. Lift the device out of the packaging to its destination using the carrying handles with 2 people.

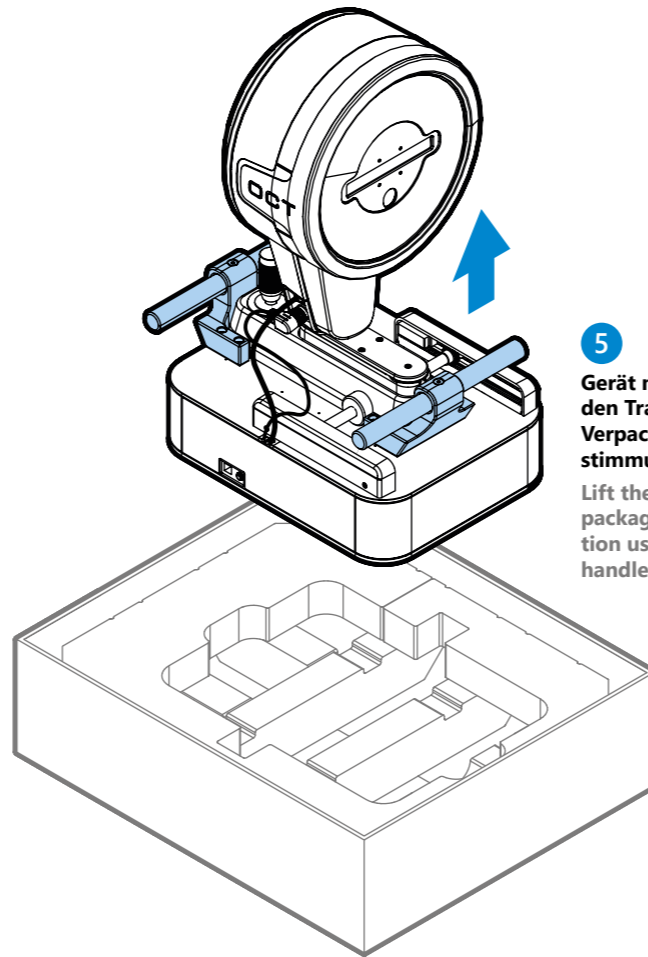


6 Jeweils 4 Schrauben an den Tragegriffen lösen und Tragegriffe abnehmen. Loosen 4 screws on each of the carrying handles and remove the carrying handles.

7 Bremse lösen und Messkopf nach vorne fahren. Release the brake and move the measuring head forwards.

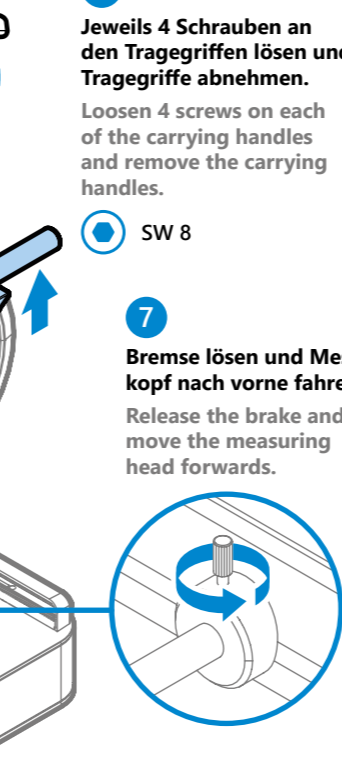


10 Kabel (PC und Strom) an die Messbox anstecken. Connect the cable (PC and power) to the measuring box.

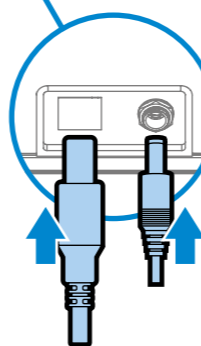


VERPACKEN PACKING


4 Messkopf mit etwas Druck leicht nach vorne kippen und Gleitplatte herausziehen. Tilt the measuring head slightly forwards with a little pressure and pull out the slide plate.

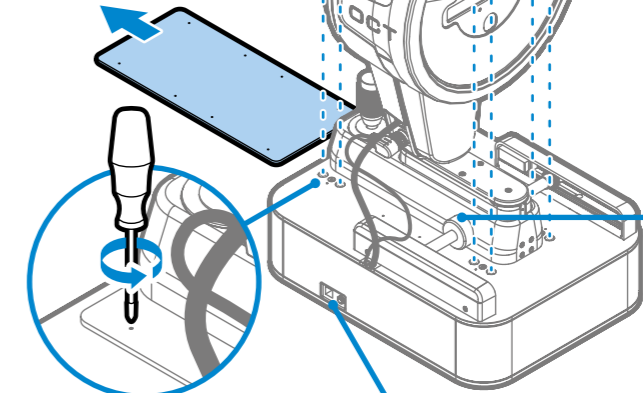


2 8 Schrauben an der Gleitplatte lösen. Loosen 8 screws on the slide plate.

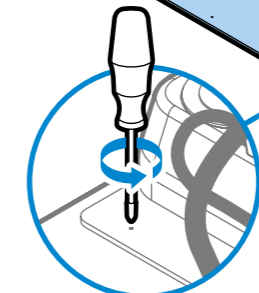

1 Kabel (PC und Strom) von der Messbox abziehen. Disconnect the cable (PC and power) to the measuring box.

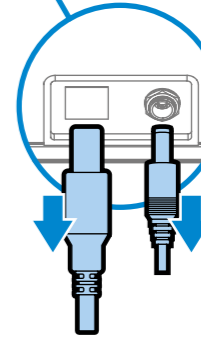


3 Bremse lösen und Messkopf nach vorne fahren. Release the brake and move the measuring head forwards.

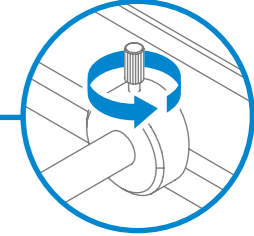

5 Beide Tragegriffe mit jeweils 4 Schrauben anschrauben. Screw on both carrying handles with 4 screws each.

SW 8

8 Staub-Schutzfolie über das Gerät stülpen. Place the dust protection foil over the device.

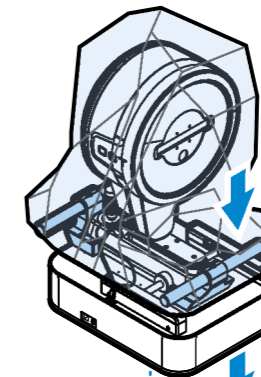

7 Gerät mit 2 Personen an den Tragegriffen in die Verpackung heben. Lift the device into the packaging with 2 people using the carrying handles.

Ausrichtung in der Verpackung beachten.
Note the orientation in the packaging.

6 Verpackung auf einem festen und ebenem Untergrund vorbereiten. Prepare the packaging on a firm and level surface.

