


9

Posez les deux pièces en mousse.

Applicare entrambe le parti in gommapiuma.

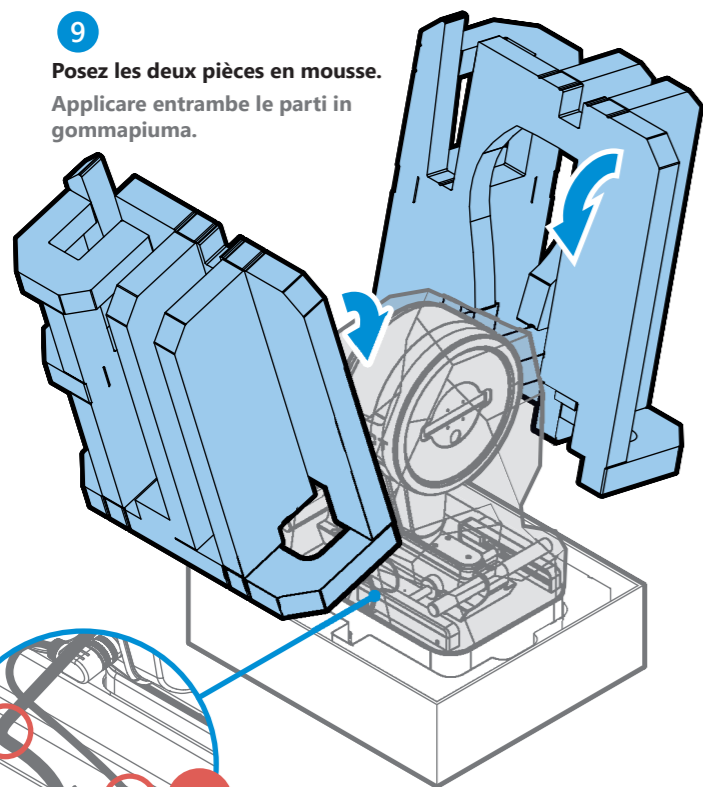


i Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble en fibre de verre.

Non attorcigliare o schiacciare i cavi in fibra ottica.

11

Mettez en place la partie supérieure de l'emballage.



Applicare la parte superiore dell'imballaggio.

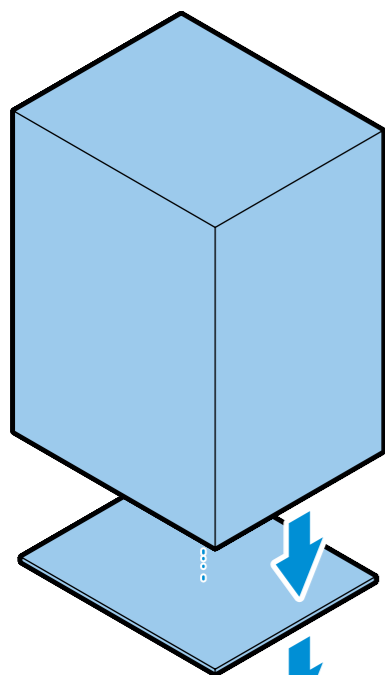

10

Posez la fixation rouge des pièces en mousse.


Applicare il fermo in gommapiuma rosso.

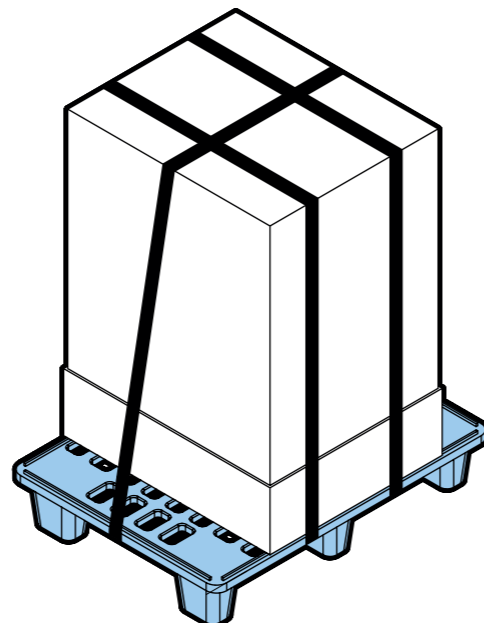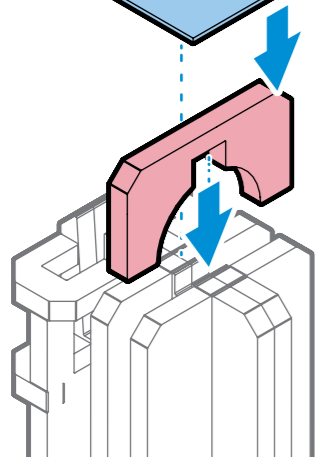

12


Fixez l'emballage sur une palette pour l'expédition.

Fissare l'imballaggio su un pallet per la spedizione.

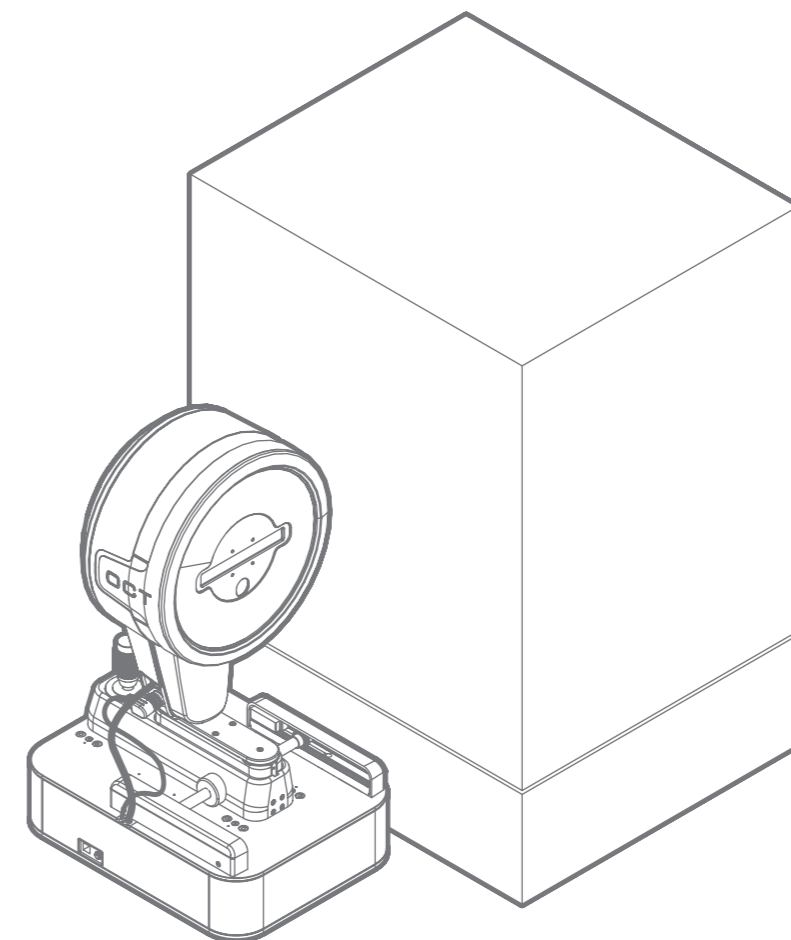

OCULUS Pentacam[®] Cornea OCT

Instructions d'emballage Istruzioni per l'imballaggio

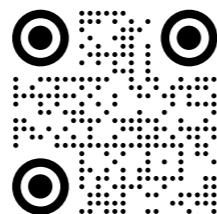

WWW.OCULUS.DE

OCULUS Optikgeräte GmbH

Münchholzhäuser Str. 29 • 35582 Wetzlar • ALLEMAGNE

Tél. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-255

E-mail : sales@oculus.de • www.oculus.de

Explication des symboles

Spiegazione dei simboli



Signale des consignes importantes.

Indica istruzioni importanti.

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza



Les consignes de ces instructions d'emballage ne s'appliquent qu'associées au mode d'emploi de votre OCULUS Pentacam Cornea OCT.

Le istruzioni contenute in queste istruzioni per l'uso si applicano solo in combinazione con le istruzioni per l'uso dell'OCULUS Pentacam Cornea OCT.

Pour éviter d'endommager l'appareil :
Per evitare di danneggiare il dispositivo:

- Observez impérativement les instructions d'emballage. Seguire sempre le istruzioni di imballaggio.
- Utilisez l'emballage de transport d'origine pour le retour. Per la spedizione di reso, utilizzare l'imballaggio di trasporto originale.

Conditions de transport et de stockage Trasporto e condizioni di immagazzinaggio

	Température Temperatura	Humidité rel. Umidità rel.	Pression d'air Pressione dell'aria
Transport Trasporto	-40 °C – +50 °C	10 % – 95 %	500 – 1 060 hPa
Stockage Immagazzinaggio	-10 °C – +50 °C	10 % – 95 %	700 – 1 060 hPa


- Protégez l'appareil emballé de l'humidité. Proteggere l'apparecchio imballato dall'umidità.

Référence / Numero articolo: 10039390

Révision / Revisione: 00

Validation / Pubblicazione: 18/03/2025

DÉBALLAGE DISIMBALLAGGIO

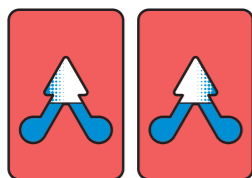

1

Contrôlez le capteur de basculement.

Controllare il sensore di inclinazione.


Si le capteur de basculement s'est déclenché, en informer OCULUS et le consigner.

Se il sensore di inclinazione è stato attivato, informare OCULUS e documentare il sensore di inclinazione.

2

Retirez la partie supérieure de l'emballage.


Rimuovere la parte superiore dell'imballaggio.

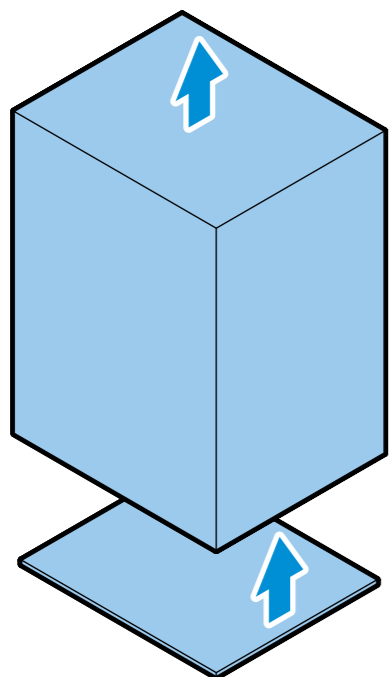

3

Retirez la fixation rouge des pièces en mousse et les pièces en mousse.




Rimuovere il fermo in gommapiuma rossa e le parti in gommapiuma.

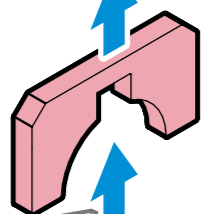

4

Retirez le film de protection contre les poussières.

Rimuovere la pellicola di protezione polvere.

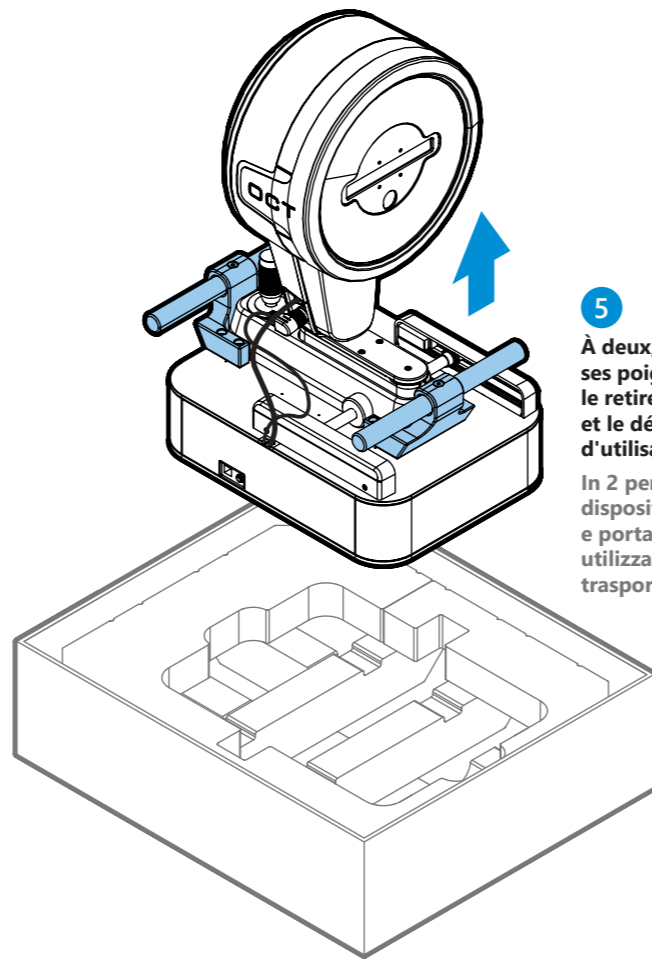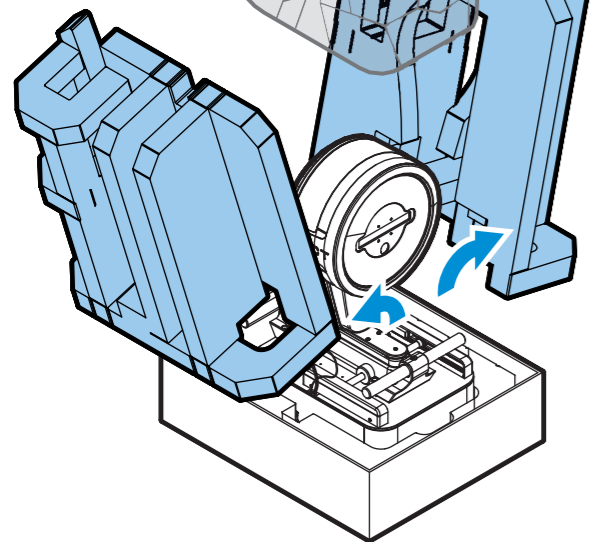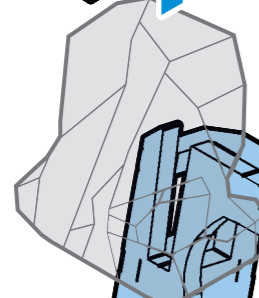

5


À deux, prenez l'appareil par ses poignées de transport pour le retirer de son emballage et le déplacer jusqu'au lieu d'utilisation prévu.

In 2 persone estrarre il dispositivo dall'imballaggio e portarlo nel luogo previsto, utilizzando le maniglie di trasporto.

8

Exercez une légère pression pour légèrement basculer la tête de mesure vers l'avant et poussez la plaque coulissante en dessous.


Inclinare leggermente in avanti la testa di misurazione con una leggera pressione e infilare la piastra di scorrimento.

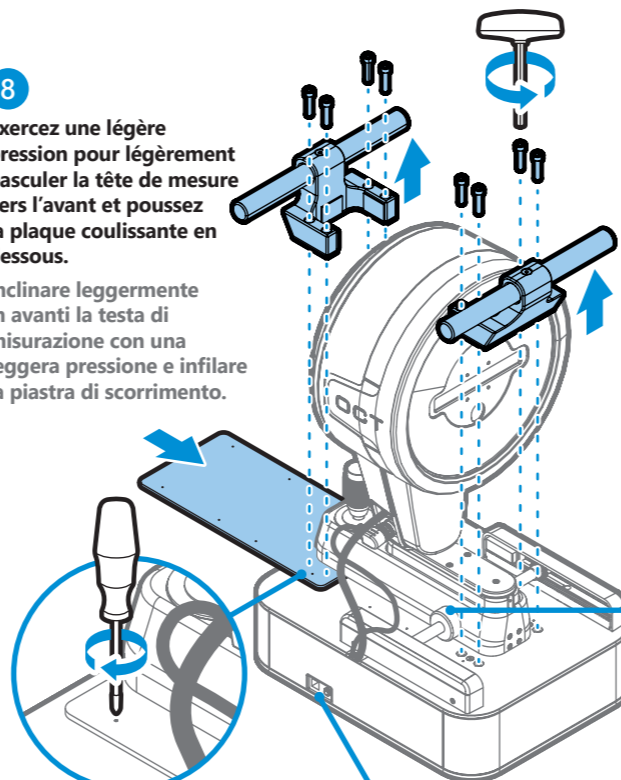

9

Vissez la plaque coulissante avec 8 vis.

Avvitare la piastra di scorrimento con 8 viti.

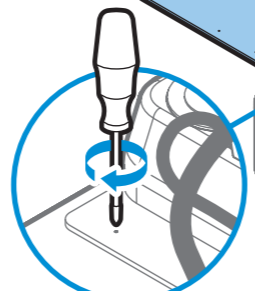

6

Desserrez les 4 vis sur chaque poignée de transport et retirez les poignées de transport.

Allentare le 4 viti su ciascuna delle maniglie di trasporto e rimuoverle.

7


Desserrez le frein et poussez la tête de mesure vers l'avant.

Rilasciare il freno e spostare la testa di misurazione in avanti.

10

Branchez les câbles (PC et d'alimentation) au boîtier de mesure.

Collegare il cavo (PC e alimentazione) dal box di misurazione.

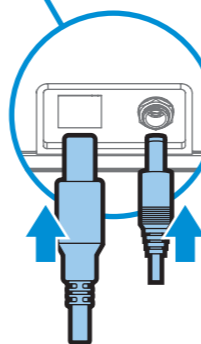

EMBALLAGE IMBALLAGGIO

4


Exercez une légère pression pour légèrement basculer la tête de mesure vers l'avant et retirez la plaque coulissante.

Inclinare leggermente in avanti la testa di misurazione con una leggera pressione ed estrarre la piastra di scorrimento.

2

Desserrez les 8 vis de la plaque coulissante.

Allentare le 8 viti della piastra di scorrimento.

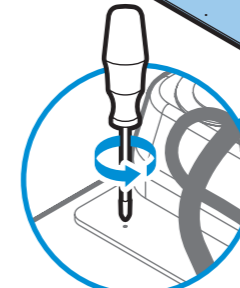

5

Vissez les deux poignées de transport avec 4 vis chacune.

Avvitare le due maniglie di trasporto con 4 viti ciascuna.

3




Desserrez le frein et poussez la tête de mesure vers l'avant.

Rilasciare il freno e spostare la testa di misurazione in avanti.

1

Débranchez les câbles (PC et d'alimentation) du boîtier de mesure.

Scollegare il cavo (PC e alimentazione) dal box di misurazione.

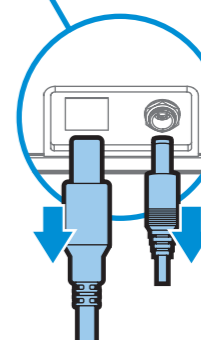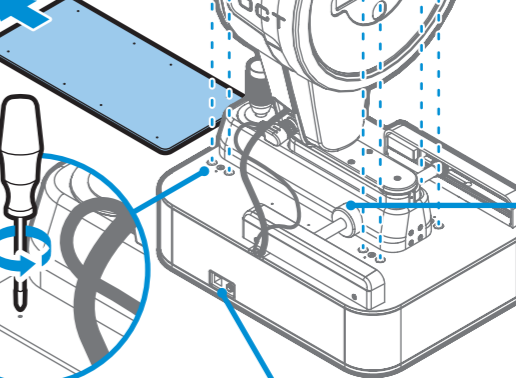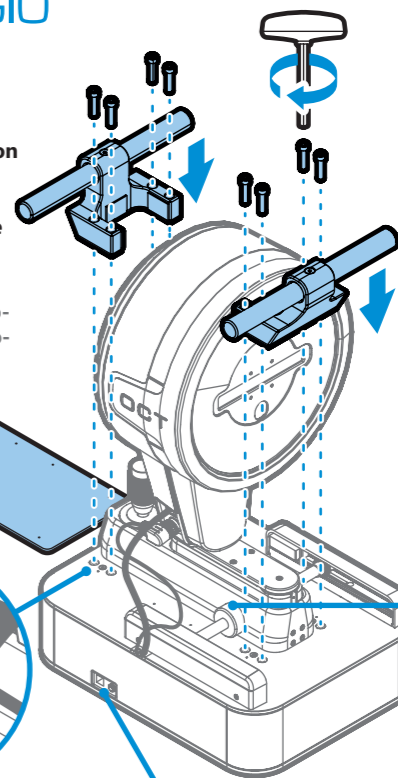

8

Recouvrez l'appareil du film de protection contre les poussières.

Posizionare la pellicola di protezione dalla polvere sul dispositivo.

7

À deux, prenez l'appareil par ses poignées de transport pour le mettre dans son emballage.

In 2 persone sollevare il dispositivo dall'imballaggio utilizzando le maniglie di trasporto.

Tenez compte de l'orientation dans l'emballage.

6

Préparez l'emballage sur un support plan et stable.

Preparare l'imballaggio su una superficie solida e piana.

