

Wie gehe ich bei der Desinfektion/Aufbereitung grundsätzlich vor?

Das hier vorgestellte Verfahren zur manuellen Aufbereitung von ophthalmologischen Geräten ist als Ergänzung zu den Angaben aus der jeweiligen produktbezogenen Gebrauchsanleitung zu verstehen. Beachten Sie unbedingt die Angaben in der Gebrauchsanweisung!

Maßnahme	Durchführung	Verantwortlich
Prüfung auf Unversehrtheit	Sichtkontrolle	Ärzte, Optiker, MFA
Vorbereitung	Direkt nach Benutzung – hygienische Händedesinfektion (EWZ 30 Sekunden beachten). Anschließend Einmalhandschuhe anziehen und viruzid/begrenzt viruzid wirksame Flächenschnelldesinfektionstücher aus Packung/Behälter entnehmen.	Ärzte, Optiker, MFA
Manuelle Reinigung und Desinfektion – nach <u>jeder</u> Untersuchung	<i>Beginnend auf der Seite des Untersuchers:</i> Die Oberflächen mit Handkontakt desinfizierend abwischen, so dass ein leichter Feuchtigkeitsfilm auf den Oberflächen sichtbar ist. Tuch werfen und selbständig abtrocknen lassen – nicht nachtrocknen. <i>Seite des Patienten / Kunden:</i> Neues Tuch entnehmen und die andere Seite des Gerätes mit Hautkontaktflächen abwischen, so dass ein leichter Feuchtigkeitsfilm auf den Oberflächen sichtbar ist. Tuch werfen und selbständig abtrocknen lassen – nicht nachtrocknen. Einweghandschuhe ausziehen und entsorgen, abschließend eine hygienische Händedesinfektion (EWZ 30 Sekunden) durchführen. Nach vollständigem Abtrocknen ist das Gerät wieder einsetzbar.	Ärzte, Optiker, MFA

<p>Manuelle Reinigung und Desinfektion – nach Untersuchung bei infektiösen Patienten / Kunden</p>	<p>Das gesamte Gerät* inklusive aller Hand- und Hautkontaktflächen mit viruzid/begrenzt viruzid wirksamen Flächenschnelldesinfektionstüchern (mehrere Tücher verwenden!) wischdesinfizierend reinigen, so dass ein Feuchtigkeitsfilm auf <u>allen</u> Oberflächen sichtbar ist. Selbständig abtrocknen lassen – nicht nachwischen. Einweghandschuhe ausziehen und entsorgen, abschließend eine hygienische Händedesinfektion (EWZ 30 Sekunden) durchführen. Nach vollständigem Abtrocknen ist das Gerät wieder einsetzbar.</p>	<p>Ärzte, Optiker, MFA</p>
<p>Manuelle Reinigung und Desinfektion – zum Tagesende</p>	<p>Das gesamte Gerät* ist komplett bei sichtbaren Verunreinigungen und mindestens 1x wöchentlich desinfizierend zu reinigen. Selbständig abtrocknen lassen – nicht nachtrocknen. Einweghandschuhe ausziehen und entsorgen, abschließend eine hygienische Händedesinfektion (EWZ 30 Sekunden) durchführen. Nach vollständigem Abtrocknen ist das Gerät wieder einsetzbar.</p>	<p>Ärzte, Optiker, MFA</p>

**) die gesamten Aussenflächen des Geräts (beachten Sie die Gebrauchsanweisung, da manche Produkte nicht komplett desinfiziert werden können)*

Welches Desinfektionsmittel kann ich einsetzen?

Bitte lesen Sie unbedingt in der jeweiligen produktbezogenen Gebrauchsanweisung nach, welches Mittel dort zur Reinigung und Desinfektion angegeben ist! Diese Mittel wurden an unseren Produkten getestet und ihre Materialverträglichkeit ist bestätigt.

In der Regel empfehlen wir in den Gebrauchsanweisungen zur Desinfektion folgende Produkte:

- mikroZid® sensitiv wipes premium, Desinfektionstücher in der Weichpackung (2 x 50 Stück)
- mikroZid® AF-Tücher, Desinfektionstücher in der Dose (150 Tücher), nachfüllbar
- mikroZid® AF-Tücher, Desinfektionstücher, Nachfüllpackung (150 Tücher)

Es kann in der aktuellen Situation sein, dass die Mittel, die in der Gebrauchsanweisung angegeben sind, nicht verfügbar sind. Weichen Sie dann am besten auf andere Produkte aus, die aus vorkonfektionierten Tüchern zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten hergestellt wurden. Die fertigen Tücher sollten mit einem Flächendesinfektionsmittel auf Basis einer wässrigen Lösung getränkt sein. Flächendesinfektionsmittel auf Basis einer wässrigen Lösung gelten als sehr materialschonend, da sie mit deutlich weniger Alkohol auskommen.

Sie finden solche Produkte in den Desinfektionsmittellisten des [Robert Koch Instituts](#) oder des [Verbunds für Angewandte Hygiene e.V.](#)

ACHTUNG: Wenn Sie auf ein Produkt ausweichen, welches nicht in der Gebrauchsanweisung angegeben ist, übernehmen wir keine Haftung bezüglich der Materialverträglichkeit. Die Anwendung des Desinfektionsmittels und die Nutzung des Produktes obliegen Ihrer Verantwortung.

Was muss ich noch beachten?

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts! Insbesondere im Kontext der Reinigung und Desinfektion.

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz bevor Sie mit der Reinigung/Desinfektion beginnen (bei elektrischen Produkten).
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Sprühen Sie Desinfektions-Lösungen nur auf ein Reinigungstuch, nicht direkt auf das Gerät. (Wir empfehlen den Einsatz fertiger mit Desinfektionslösung getränkter Tücher, s.o.).
- Vermeiden Sie beim Reinigen/Desinfizieren das Ausüben von zu starkem Druck.
- Vermeiden Sie beim Reinigen/Desinfizieren wiederholtes Reiben an derselben Stelle.