

Offizielles Statement von NIDEK CO.,LTD zur Desinfektion der NIDEK-Geräte:  
<https://www.nidek-intl.com/news-event/news/entry-3850.html>

Aus dem Englischen übersetzt:

### **Desinfektion der NIDEK-Produkte**

Stand 16.04.2020

Mit dem Patienten in Kontakt stehende Teile (Kinn- und Stirnstütze) und das Gehäuse der NIDEK-Produkte können mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch abgewischt werden.

**Beachten Sie jedoch, dass folgende Aktionen Gerätebeschädigungen verursachen:**

- Ausüben von starkem Druck, der das Gehäuse verformt
- Wiederholtes Reiben an derselben Stelle
- Tränken des verwendeten Tuches mit Alkohol, sodass es tropfnass ist
- Direktes Einsprühen der Produkte mit Alkohol

Bei Verwendung von Desinfektionsalkohol zum Zwecke der Desinfektion wird empfohlen, den Desinfektionsalkohol mit einer Konzentration von mindestens 70 % zu verwenden (Richtlinie AAO: siehe \* 1).

\* 1 <https://www.aa.org/headline/alert-important-coronavirus-context>

NIDEK empfiehlt, das Gerät bei vorliegenden Infektionen vorsichtiger zu verwenden. Dies schließt ein, das Gerät nicht zu benutzen.

Diese Anleitung zur Desinfektion ergänzt die Reinigungsempfehlungen, die in den produktspezifischen Gebrauchsanweisungen beschrieben sind.

OCULUS empfiehlt, zusätzlich die nationalen Richtlinien des Robert-Koch-Instituts zu beachten.